

# MODE D'EMPLOI

## Masque Ambu® King

Ambu



### Usage prévu

Les masques Ambu King sont conçus pour diriger les gaz d'anesthésie ou médicaux vers les voies aériennes supérieures du patient sans qu'il soit nécessaire d'introduire un appareil dans sa trachée.

Ce dispositif est réservé à un usage en environnement hospitalier ou pré-hospitalier.

Destiné à une utilisation par un personnel formé à la RCP uniquement.

Masque facial pour anesthésie à usage unique.  
Non stérile, non conducteur et muni d'une valve de gonflage.  
Masque facial à usage patient unique.  
Sans latex de caoutchouc naturel.  
Sans phtalates.  
Ce produit ne présente aucun danger en cas d'IRM.

### Mode d'emploi

- Retirer le masque de l'emballage et procéder à son inspection. En cas de dégâts, de saleté ou de déformation, mettre le masque au rebut et en prendre un de remplacement.
- Vérifier que le niveau de gonflage du bourrelet convient pour une étanchéité parfaite lors de l'application sur le visage du patient.
- Si le masque comporte une embase dont vous ne pensez pas vous servir, l'ôter.
- Pour régler le gonflage du bourrelet, insérer une seringue à embout Luer standard dans la valve de gonflage. Gonfler ou dégonfler selon les besoins.
- Si nécessaire, nettoyer manuellement la surface du produit à l'eau avec un détergent doux. Rincer soigneusement à l'eau claire. Laisser sécher et vérifier que le masque est parfaitement opérationnel avant de le réutiliser sur le même patient. S'il ne fonctionne pas parfaitement, le masque doit être mis au rebut.
- Jeter le masque après l'avoir utilisé sur un patient, conformément au protocole établi par l'hôpital.

### AVERTISSEMENTS

- Éviter tout contact avec des objets tranchants qui peuvent détériorer le bourrelet.
- Dispositif à usage unique.
- Toute utilisation sur un autre patient risque de provoquer une contamination croisée.
- La conception et le matériau du dispositif ne permettent pas de nettoyage automatique ou de stérilisation, ces procédures étant susceptibles de laisser des résidus nocifs ou de provoquer un dysfonctionnement du dispositif.
- Les masques parfumés sont contre-indiqués chez les patients présentant des allergies avérées aux fragrances et aux matières plastiques.

### MISES EN GARDE

- Si le masque est trop gonflé ou si la pression exercée pour le maintenir en place est trop importante, les voies aériennes du patient peuvent être gênées, voire obstruées.
- De même, si le masque n'est pas assez gonflé, l'étanchéité sera médiocre et des fuites pourront se produire.
- Le masque est conçu pour se fixer sur un raccord standard. Le diamètre intérieur du raccord #1 à 2 du masque n'étant pas standard, ce dernier ne doit pas être fixé à d'autres dispositifs médicaux. Le diamètre extérieur du raccord #3 à 7 n'étant pas standard, ce dernier ne doit pas être fixé à d'autres dispositifs médicaux.
- Les lois fédérales des États-Unis exigent que la vente de ce dispositif ne se fasse que sur ordonnance ou par l'intermédiaire d'un professionnel de santé autorisé.

Indications concernant les symboles	Description
-------------------------------------	-------------




Compatible IRM

Plage de température de stockage: -40 °C à +60 °C  
Plage de température de fonctionnement: -18 °C à +50 °C

Dimensions du raccord:  
Tailles du masque Ambu King: n°1 – n°2, raccord avec DE de 15 mm  
Tailles du masque Ambu King: n°3 – n°7, raccord avec DI de 22 mm

Ambu

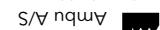

Ambu A/S

Båtorpbakken 13

2750 Ballerup

Danemark

T +45 72 25 20 00

ambu.com

Etats-Unis: Rx only

Ambu® est une marque déposée d'Ambu A/S, Danemark  
La société Ambu A/S est certifiée ISO 13485.